

MEDIX XG

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ЗЕЛЁНОМУ СВЕТУ РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЁНКА

Характеристика

MEDIX XG – это чувствительная к зелёному свету пролитая с двух сторон медицинская рентгеновская плёнка высокого качества с высоким контрастом, низким помутнением и низким шумовым фоном.

Применение

MEDIX XG предназначена для универсального использования в радиодиагностике с зелёной эмитирующей усиливающей фольгой.

Чувствительность плёнки приспособлена для специального применения согласно с современными международными масштабами.

MEDIX XG можно использовать с отличными результатами в ангиографии, она предоставляет острое и подробное изображение самых маленьких сосудов. Плёнка отлично изображает структуру костей, с её помощью можно диагностировать даже самые маленькие переломы.

Преимущества

- отличная стабильность во всех типах обрабатывающих растворов предназначенных для процесса 90 сек
- высокий контраст в изображениях с низкой прозрачностью

Подкладка

MEDIX XG изготавливается на полиэфирной подкладке постоянных размеров синего цвета толщиной 0.18 мм. Плёнка оснащена с обеих сторон защитным слоем от механического повреждения и электростатических разрядов.

Обработка

MEDIX XG добавляется в форматах от 13x18 до 35.6x43.2 см, иногда в нестандартных форматах в упаковке по 100 листов в картонной коробке.

Освещение тёмной лаборатории

MEDIX XG перерабатывается при непрямом тёмно-красном безопасном освещении, с матовой лампочкой 15 Вт на минимальном расстоянии от плёнки 1.2 м или при диодном освещении с длиной волны 660 нм.

Оливково-зелёный осветлительный фильтр нельзя использовать.

Переработка


MEDIX XG перерабатывается в проявочных машинах с циклом 90 сек. Оптимальных результатов достигается с проявителем FOMA LP-D и закрепителем быстрого действия FOMAFIX + FOMAFIX H.

Хранение

Неэкспонированную плёнку необходимо хранить в неповрежденной оригинальной упаковке (коробки надо хранить в вертикальном положении) при температуре не выше 25°C с относительной влажностью 40–60 % воздуха, помимо влияния вредных испарений, газов, рентгеновского или др. ионизирующих излучений. Те же самые условия касаются также транспорта.

Изделие обозначено CE и производится и вводится на рынок согласно требованиям директивы Совета 93/42/EHS и системам норм ČSN EN ISO 9001:2008 и ČSN EN ISO 13485:2012.

Характеристическая кривая

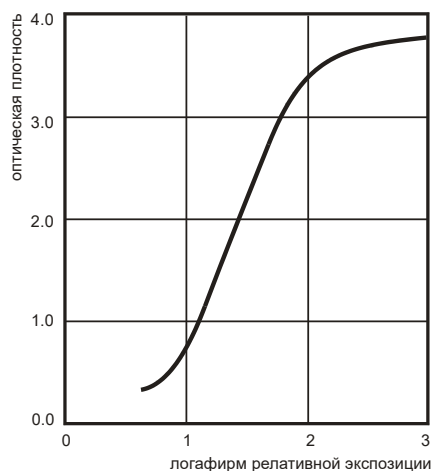

Переработка:

Проявочная машина PROTEC M 45
Проявитель FOMA LP-D, 34°C/2 мин.

Спектральная чувствительность

